



1. Mit Hilfe des Applikatorstäbchens des Pufferfläschchens eine kleine Portion (5-6 mm Durchmesser) der Stuhlprobe in den Verdünnungspuffer überführen. 15 Sekunden mischen.

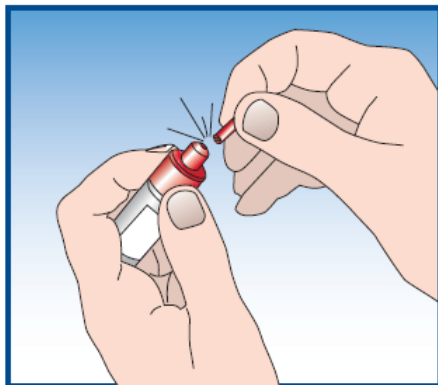

2. Das Fläschchen senkrecht halten und leicht auf den Tisch klopfen. Mit Hilfe eines Papiertuchs die Spitze des Pufferfläschchens abbrechen.

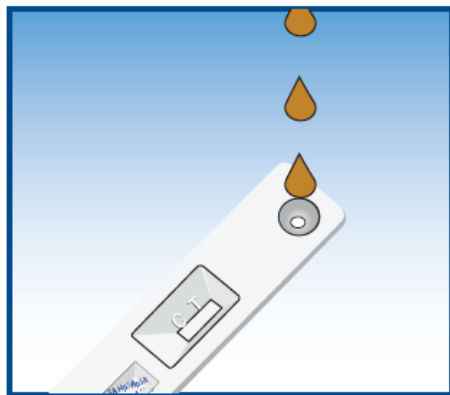

3. In das runde Fenster der Testkassette 3 Tropfen geben und das Ergebnis nach 5 Minuten ablesen.



Positiv



Negativ



Ungültig

Diese Kurzanleitung enthält nicht die vollständige Arbeitsanleitung. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Packungsbeilage.