

	<b>AllergyScreen Testanleitung</b>
Vorbereitung	Teststreifen mit Waschpuffer abspülen, Reaktionswanne ausklopfen
<b>1. Inkubation</b>	<b>0,25 ml Serum, 45 Min. auf dem Schüttler inkubieren</b>
Waschen	mit Waschpuffer abspülen, ausklopfen
<b>2. Inkubation</b>	<b>6-7 Tr. Detektorlösung (weisse Verschlusskappe), 45 Min. auf dem Schüttler inkubieren</b>
Waschen	mit Waschpuffer abspülen, ausklopfen
<b>3. Inkubation</b>	<b>6-7 Tr. Konjugatlösung (rote Verschlusskappe), 20 Min. auf dem Schüttler inkubieren</b>
Waschen	mit Waschpuffer abspülen, ausklopfen
<b>4. Inkubation</b>	<b>6-7 Tr. Farbstofflösung (schwarzes Fläschchen), 20 Min. im Dunkeln auf dem Schüttler inkubieren, Zeit falls nötig an Raumtemperatur anpassen (siehe Packungsbeilage)</b>
Waschen	mit Leitungswasser abspülen, ausklopfen
Auswertung	Teststreifen trocknen und auswerten

Ausführlichere Information: siehe der Packung beiliegende Testanleitung

Vertrieb Schweiz:  
TEOMED AG  
8606 Greifensee  
Tel. 044 / 942 00 13  
Fax 044 / 942 00 19